









F-2.2-17 Instructions for Use - Patient DE

- [Symbole-Lexikon](#)
- [Levy Health GmbH](#)
- [LEVY Fertility Code Systemanforderungen](#)
- [Rechtliche Hinweise](#)
- [Sicherheit und Einhaltung gesetzlicher Vorschriften](#)
- [LEVY Fertility Code - System-Warnhinweise und Vorsichtsmaßnahmen](#)
- [In-Vitro-Diagnostikum Medizinprodukt](#)
- [Bestimmungsgemäße Verwendung](#)
 - [Kontraindikationen](#)
 - [Nutzer*innenprofil](#)
- [Wie Sie den LEVY Fertility Code verwenden](#)
 - [Schritt 1 - Registrierung](#)
 - [Schritt 2 - Anmeldung](#)
 - [Schritt 3 - Medizinischer Fragebogen](#)
 - [Schritt 4 - Gespräch mit LEVY Care Team](#)
 - [Schritt 5 - Empfehlung für persönliche Labordiagnostik](#)
 - [Schritt 6 - Wählen Sie ein Labor](#)
 - [Schritt 6.1 - Blutabnahme - LEVY Partnerlabor](#)
 - [Schritt 7 - Online Arztkonsultation](#)
 - [Schritt 8 - Deine Ergebnisse](#)
- [Navigationsleisten](#)
 - [Mein Gesundheitsprofil](#)
 - [Fragebogen](#)
 - [Meine Dokumente](#)
 - [Meine Ergebnisse](#)
 - [LEVY Lounge](#)
 - [LEVY Lesenswert](#)
- [Reklamation und Feedback](#)

Symbole-Lexikon

Europäische Konformität	Hersteller	In vitro Diagnostic
		

<p>Seriennummer = LFC202109</p> 	<p>Herstellungsdatum = 2021- 09</p> 	<p>Elektronische Gebrauchsanweisung</p> 
<p>Achtung</p> 	<p>Information</p> 	

Levy Health GmbH



LEVY Health GmbH
Torstraße 223
10115 Berlin



Für Unterstützung und technische Beratung wenden Sie sich bitte an das LEVY Care Team unter care@levy.health.

E-Mail: care@levy.health

Bitte fügen Sie eine detaillierte Beschreibung aller aufgetretenen Probleme und Ihre Kontaktdaten bei.

LEVY Fertility Code Systemanforderungen



Um den LEVY Fertility Code zu nutzen, müssen Sie 25 bis 51 Jahre alt sein und Deutsch oder Englisch sprechen. Sie benötigen eine persönliche E-Mail-Adresse und ein Gerät mit Internetzugang. Unsere Anwendung ist mit den Versionen der folgenden Webbrowser kompatibel:

Desktop

- Google Chrome (ab Version 100)
- Microsoft Edge (ab Version 100)
- Firefox (ab Version 99)
- Safari (ab Version 15))

Der LEVY Fertility Code sollte auf einem Desktop/Notebook verwendet werden.

Rechtliche Hinweise



Kein Teil dieser Publikation darf ohne schriftliche Genehmigung der Levy Health GmbH in irgendeiner Form oder mit irgendwelchen Mitteln, elektronisch oder mechanisch, einschließlich Fotokopie, Aufzeichnung oder einem Informationsspeicher- oder -abrufsystem, vervielfältigt oder übertragen werden.

Die Levy Health GmbH behält sich das Recht vor, ihre Produkte und Dienstleistungen jederzeit zu ändern. Diese Gebrauchsanweisung kann ohne vorherige Ankündigung geändert werden. Obwohl die Gebrauchsanwendung erstellt wurde, um eine genaue Anwendung des LEVY Fertility Codes zu gewährleisten, übernimmt die Levy Health GmbH keine Haftung für Fehler oder für Schäden, die aus dem Gebrauch dieser Information entstehen.

Sicherheit und Einhaltung gesetzlicher Vorschriften

Der LEVY Fertility Code wurde umfassend getestet und erfüllt alle der folgenden anwendbaren gesetzlichen Anforderungen:



Das CE-Zeichen zeigt an, dass der Hersteller sicherstellt, dass das Produkt mit den grundlegenden Anforderungen der europäischen Richtlinie für In-vitro-Diagnostika 98/79/EG übereinstimmt.

LEVY Fertility Code - System-Warnhinweise und Vorsichtsmaßnahmen



- Für den Einsatz in der In-vitro-Diagnostik.
- Vergewissern Sie sich immer, dass das elektronische Gerät, das Sie verwenden, passwortgeschützt ist, um Ihre Daten sicher zu halten, und dass Ihr Passwort nicht in fremde Hände geraten kann.
- Beim Beantworten des Medizinischen Fragebogens ist es wichtig, dass Sie sich in einer Umgebung befinden, die Sie nicht ablenkt. Die Blutdiagnostik die Ihnen im nächsten Schritt empfohlen wird, hängt von den Antworten ab, die Sie geben. Inkorrekte Angaben können somit zu fälschlichen Empfehlungen und damit zu Ergebnissen führen, die auf Sie nicht zutreffen.
- Aufgrund möglicher Software-Fehler im LEVY Fertility Code, kann es dazu kommen, dass Ihnen ein falsches Ergebnis angezeigt wird. Dieses wird im Anschluss von unseren Ärzt*innen geprüft und mit Ihnen besprochen.
- Befolgen Sie ebenfalls alle Anweisungen, wenn Sie sich auf die Blutuntersuchung vorbereiten, da dies die diagnostischen Ergebnisse beeinflussen kann. Da wir keinen Einfluss darauf haben, wie schnell das von Ihnen gewählte Labor Ihre Blutergebnisse auswertet und uns zur Verwendung zurückschickt, kann es dazu kommen, dass Ihnen Ihre Ergebnisse etwas verspätet mitgeteilt werden. Wir bemühen uns in jedem Fall darum, dass dies nicht geschieht und sind in enger Abstimmung mit den jeweiligen Laboren.

In-Vitro-Diagnostikum Medizinprodukt

Name: LEVY Fertility Code

Bestimmungsgemäße Verwendung



Der LEVY Fertility Code ist eine eigenständige Software zur Unterstützung klinischer Entscheidungen, die In-vitro-Diagnosegeräte und die Krankengeschichte der Patientin nutzt, um Ärzte bei der Diagnose weiblicher Sterilitätskrankheiten zu unterstützen.

Kontraindikationen



Die LFC darf nicht angewendet werden, wenn die Anwenderin in den letzten drei Monaten hormonell verhütet hat, in den letzten drei Monaten eine hormonelle Verhütung begonnen oder beendet hat, in den letzten acht Wochen eine Fehlgeburt hatte oder in den letzten acht Wochen entbunden hat.

Nutzer*innenprofil

Der LEVY Fertility Code richtet sich an Frauen mit unerfülltem Kinderwunsch, die zwischen 25 und 51 Jahre alt sind.

Wie Sie den LEVY Fertility Code verwenden



Schritt 1 - Registrierung

Dies erfordert im ersten Schritt eine Registrierung. Bitte wählen Sie ein Passwort mit ausreichender Stärke (mindestens 8 Zeichen) und stellen Sie sicher, dass niemand auf Ihre Zugangsdaten zugreifen kann.

1. Wie heißt du? 2. Erstelle deinen Account 3. Bevor wir weitermachen...

Hi, ich bin Stephanie von LEVY Health.

Um dich auf deiner Kinderwunschreise bestmöglich begleiten zu können, habe ich ein paar Fragen an dich.

Lass uns anfangen! Wie heißt du?

VORNAME NACHNAME LAND

Dein Vorname Dein Nachname Dein Land

ICH STIMME DEN ALLGEMEINEN GESCHÄFTSBEDINGUNGEN UND DEN DATENSCHUTZRICHTLINIEN DER LEVY HEALTH GMBH ZU.

Zurück Weiter

Du hast schon ein Konto? [Melde dich hier an!](#)

Schritt 2 - Anmeldung

Verwenden Sie Ihre E-Mail-Adresse und Ihr Passwort, um sich anzumelden.

LEVY
Decoding your fertility

Bei LEVY anmelden.
Noch nicht registriert? [Jetzt registrieren](#)

E-MAIL
Deine E-Mail-Adresse

PASSWORT
Dein Passwort


[Passwort vergessen?](#)

Anmelden

Schritt 3 - Medizinischer Fragebogen

Nach der Anmeldung wird Ihnen der Medizinischer Fragebogen angezeigt, den Sie ausfüllen müssen.

- Um den Fragebogen zu starten, drücken Sie auf starten
- Um die FAQ anzusehen, drücken Sie den “Ansehen”-Button
- Um die Gebrauchsanweisung zu sehen, drücken Sie den “Ansehen”-Button

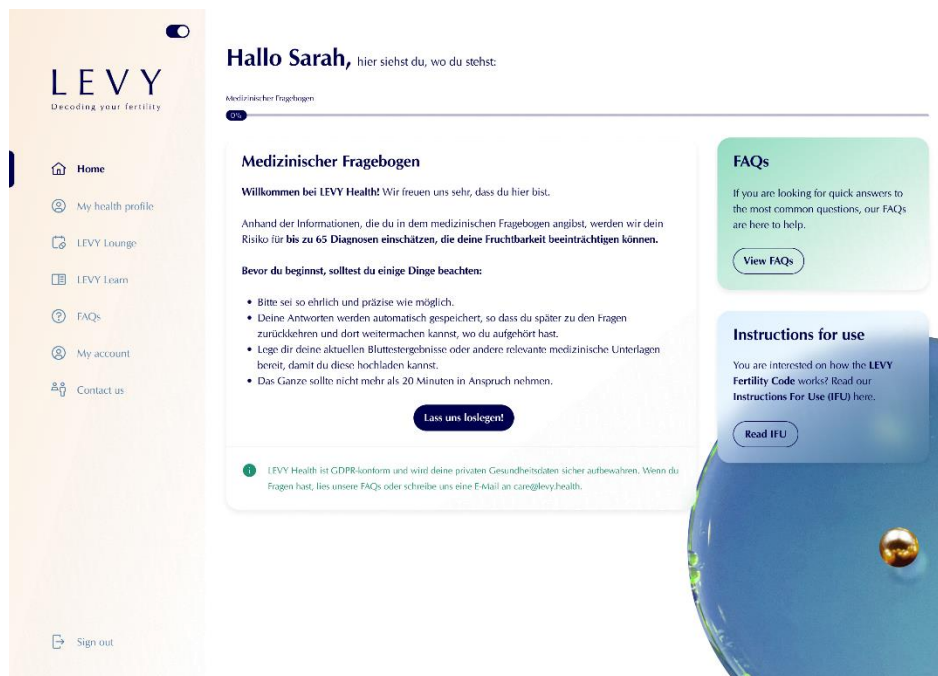

Während der Beantwortung des Fragebogens zur Anamnese werden Sie aufgefordert, alle Ihnen vorliegende Unterlagen hochzuladen, die uns bei der Diagnosestellung helfen können. Ihre Antworten werden automatisch gespeichert.

Schritt 4 - Gespräch mit LEVY Care Team

Sobald Sie den Fragebogen ausgefüllt haben, werden Sie gebeten, einen Termin mit einer/m Vertreter*in des LEVY Care Teams zu vereinbaren. Verfügbare Tage und Uhrzeiten sind blau dargestellt, der von Ihnen gewählte Termin wird Dunkelblau dargestellt.



Vergessen Sie nicht, sich zum Zeitpunkt des Gesprächs rechtzeitig in den LEVY Fertility Code einzuloggen.

Halo Pia, hier siehst du, wo du stehst:

Mein Account | Medizinische Fragebogen | Checkin GEPÄSCH | 100%

Dein Termin mit dem LEVY Care Team

Dienstag, 09.06.2022
14:00

Dein/e persönliche/r LEVY Care Team Betreuer/in wartet auf dich! Du kannst dem Gespräch 5 Minuten vor Beginn beitreten.

[Gespräch beitreten](#)

Was erwartest dich bei deinem Check in Call?

- Dein/e LEVY Care Team Betreuer/in wird dich zusätzlich über die Bluttests informieren, die wir für deine Diagnose benötigen. Stelle alle Fragen, die dir in den Sinn kommen, wir sind ein offenes Buch für dich.
- Gemeinsam schauen wir auf deinen Zyklus um herauszufinden, an welchen Tagen du dir Blut abnehmen lassen solltest.
- Wir können dich über alle Dinge auf, die am Tag der Blutabnahme zu beachten sind und helfen dir bei der Wahl eines geeigneten Labors.
- Und wie immer möchten wir wissen, wie es dir geht und wie wir dich unterstützen können.
- Das Gespräch wird 20 Minuten dauern.

FAQs
Schnelle Antworten auf häufig gestellte Fragen findest du in unserer **FAQ-Übersicht**.

[FAQs ansehen](#)

Gebrauchsanweisung
Wie funktioniert die LEVY Fertility Code genau? Lies dir unsere Gebrauchsanweisung durch!

[Ansehen](#)

Abmelden

Schritt 5 - Empfehlung für persönliche Labordiagnostik

Ein/e Vertreter*in des LEVY Care Teams wird Ihnen die Biomarker erklären, die LEVY Fertility Code für Sie empfiehlt. Sie/er wird Ihnen bei der Auswahl eines Labors und des richtigen Zeitpunkts für die Blutentnahme helfen (in der Regel ist dies am Zyklustag 2-5).

Zusätzliche Informationen zu den Biomarkern, die Ihnen zur Untersuchung empfohlen werden, finden Sie, indem Sie auf die Dropdown-Pfeile in den Labor-Panels klicken.

Halo Pia, hier siehst du, wo du stehst:

Mein Account | Medizinische Fragebogen | Checkin GEPÄSCH | Deine Blutdiagnostik | 100%

Du möchtest zu deinem Gespräch zurück? [Gespräch beitreten](#) Bitte nimm nur über einen Laptop oder PC teil!

Deine Blutdiagnostik

Spitz! Der LEVY Fertility Code hat deine Antworten ausgewertet und dein persönliches Set an Biomarker zur Laboranalyse erstellt. Unter Biomarkern sind grundsätzlich charakteristische biologische Merkmale deines Körpers zu verstehen; in diesem Fall handelt es sich um Biomarker in deinem Blut, also einzelne Laborwerte.

Wie geht es jetzt weiter? Am besten, du klickst dich durch die verschiedenen Kategorien von Biomarkern, sogenannte Panels, durch. Du erfüllst, was genau hinter den einzelnen Laborwerten steckt und warum wir sie für deine Diagnostik brauchen - bei uns gibt es volle Transparenz!

Basis-Hormondiagnostik | **Basis-Vitaminsdiagnostik** | **Impfstatus**

Basis-Hormondiagnostik €0.00

Der Hormonhaushalt einer Frau ist ein komplexes System, das von verschiedenen Organen im Körper gesteuert wird. Die Funktion der Organe und das Zusammenspiel der von ihnen produzierten Hormone ist die Voraussetzung für einen normal funktionierenden Menstruationszyklus und somit für eine Schwangerschaft. Kommt ein Teil des Systems aus dem Gleichgewicht, kann das komplette System gestört sein. Der Basis-Hormonstatus erfasst den Hormonhaushalt... [Weiterlesen](#)

Deine ausgewählten Biomarker
FSH, LH, AMH, TSH-Haar, Progästin, Östradiol, Progesteron, Testosteron, DHTAS, SHBG (Sexualhormon bd. Globulin), Freier Androgenindex (FAI)

[In Preisverhältnis](#)

Zwischensumme: €87.09 €31.40

[Weiter](#)

Abmelden


Schritt 6 - Wählen Sie ein Labor

Nun müssen Sie ein Labor finden, das Ihnen das Blut abnehmen und auf die Ihnen empfohlenen Laborparameter testen kann. Wir haben mehrere Labore identifiziert, die unsere Anforderungen erfüllen und die Sie auswählen können, um die Diagnostik dort durchführen zu lassen. Ein Mitglied des LEVY Care Teams wird Ihnen während des Gesprächs (siehe Schritt 4) helfen, das nächstgelegene Labor zu finden.

Wenn Sie ein Labor kennen, das noch näher für Sie liegt, können Sie zu diesem Labor gehen, um Ihre Blutprobe entnehmen und analysieren zu lassen. Die Voraussetzungen für das Labor sind:

- Alle im LEVY Fertility Code persönlich für Sie empfohlenen Biomarker können analysiert werden.
- Sie erhalten den Laborbefund in Form eines elektronischen PDFs, wobei alle Ergebnisse mit Zahlen, Einheiten und die dazugehörigen Normbereiche angezeigt werden.


Wichtig: Bei den meisten der von uns empfohlenen Labore ist eine vorherige Terminvereinbarung nicht erforderlich.

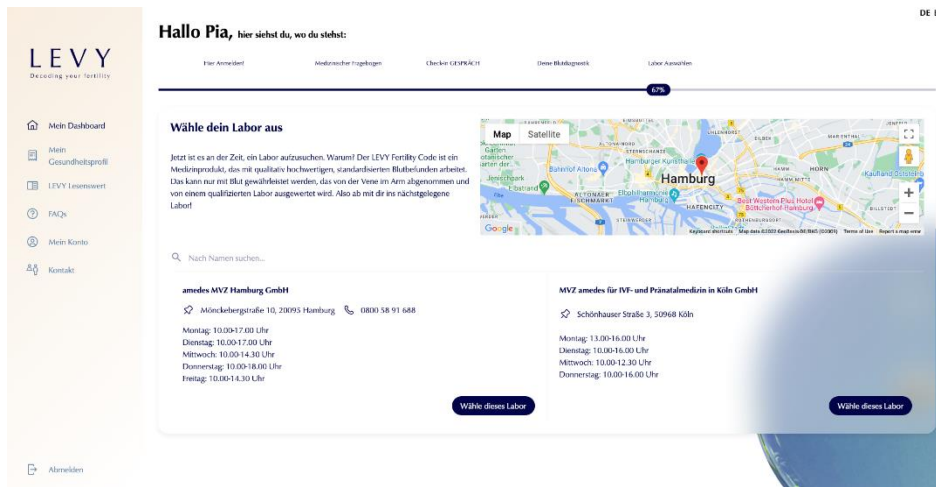

Schritt 6.1 - Blutabnahme - LEVY Partnerlabor

Wenn Sie zu einem LEVY Partnerlabor gehen, müssen Sie die Laborüberweisung vorab herunterladen. Drucken Sie das PDF aus, und nehmen Sie es in das Labor mit.

Sobald die Ergebnisse vorliegen, werden Sie per E-Mail informiert, dass Ihre Ergebnisse verfügbar sind.

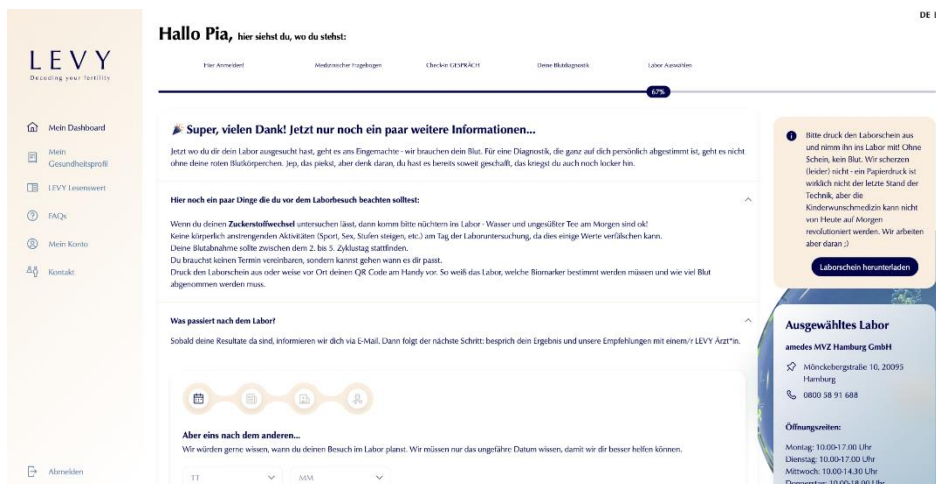


Schritt 7 - Online Arztkonsultation

Sobald Ihre Laborergebnisse vorliegen, können Sie einen Beratungstermin mit einer/m unserer Ärzt*innen vereinbaren. Klicken Sie auf die Schaltfläche "Termin buchen", um einen Termin zu vereinbaren.

The screenshot shows the LEVY user interface. On the left is a navigation menu with options: Mein Dashboard, Mein Konto, LEVY Lounge, LEVY Lesenswert, FAQs, and Kontakt. The main content area is titled "Halo Caroline, hier siehst du, wo du stehst:" and features a progress bar with five steps: Medizinischer Fragebogen, Check-in Gespräch, Blutschieber, Ergebnisse hochladen, and ärztliche Konsultation (which is currently active). Below the progress bar, there is a section titled "Vereinbare eine Videosprechstunde mit einer/m LEVY Ärzt*in". This section contains text explaining that users can book a video consultation with a specialist, that the consultation will last about 15 minutes, and that the LEVY Care Team is available for questions. A prominent "Arzttermin buchen" button is located at the bottom of this section. To the right of the main text is a "FAQs" box with a "FAQs ansehen" button. At the bottom right of the interface is a large, stylized image of a globe.



Wenn es an der Zeit ist, dem Anruf beizutreten, wird Ihnen der unten stehende Bildschirm angezeigt. Denken Sie daran, pünktlich zu sein, da sich Ihr Termin sonst verkürzt. Wenn Sie den Termin nicht einhalten können, informieren Sie uns bitte spätestens 24h vorher. Sie können kostenfrei bis zu 24h vor Ihrem Termin eine Buchungsänderung vornehmen. Sofern Sie nicht erscheinen, oder den Termin innerhalb der 24 Stunden Frist ändern, fallen weitere Gebühren an. Diese finden Sie unter LEVY Services, denn ein neuer Termin wird gebucht und verrechnet.

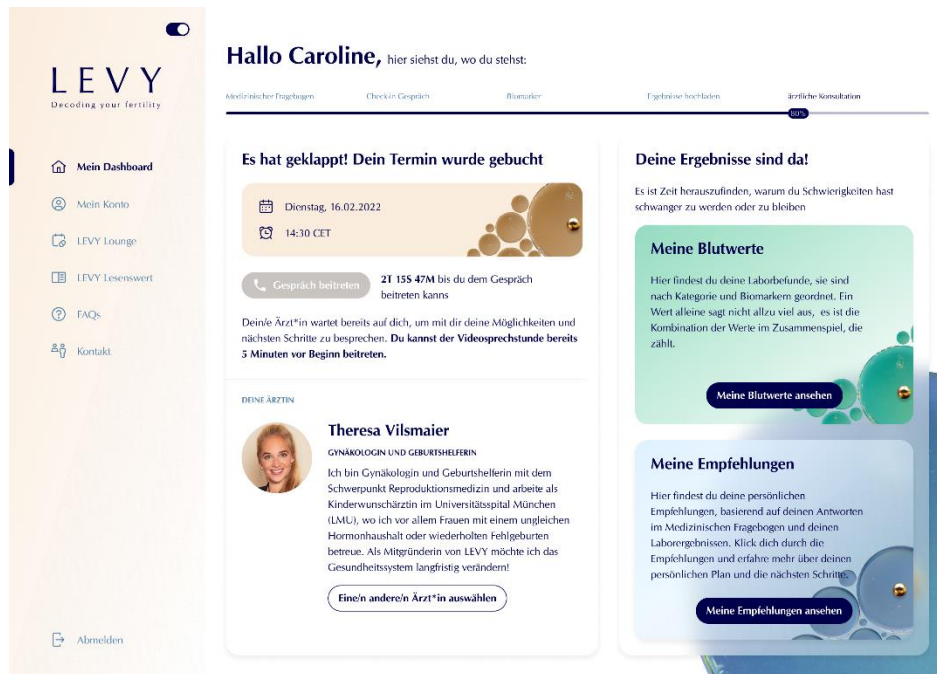

Schritt 8 - Deine Ergebnisse

Sobald Sie Ihr Beratungsgespräch mit unserer/m Arzt/Ärztin hatten, werden Ihnen Ihre Laborergebnisse zur Verfügung gestellt. Diese sind in zwei Abschnitte unterteilt:

- Ihre Ergebnisse:
 - Hier werden Ihre Ergebnisse der Blutuntersuchung angezeigt und ob die Werte innerhalb oder außerhalb des Normbereichs liegen.
- Ihre Empfehlungen:
 - Hier sehen Sie, welche weiteren Schritte Ihr Arzt/Ihre Ärztin mit Hilfe des LEVY Fertility Code für Sie empfiehlt. Die Empfehlungen sind in drei Kategorien unterteilt:
 - Externe Überweisungen
 - Weitere Diagnostik
 - Online Therapie

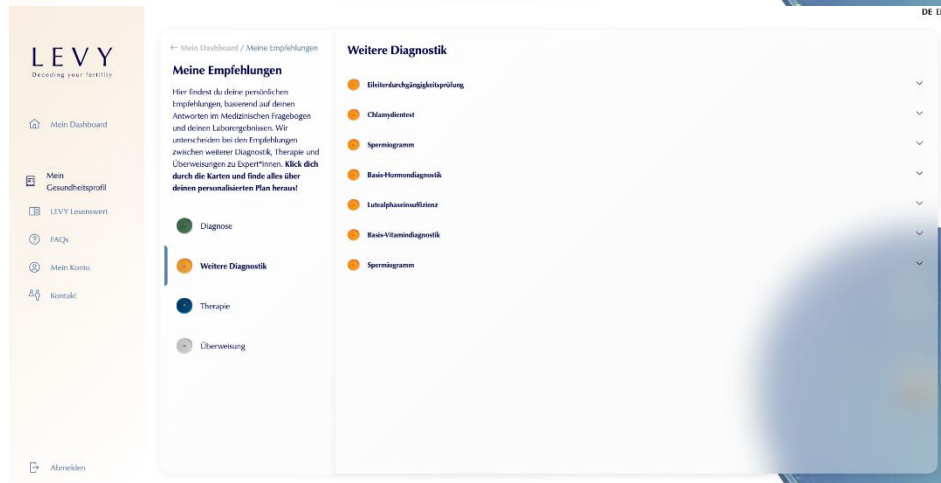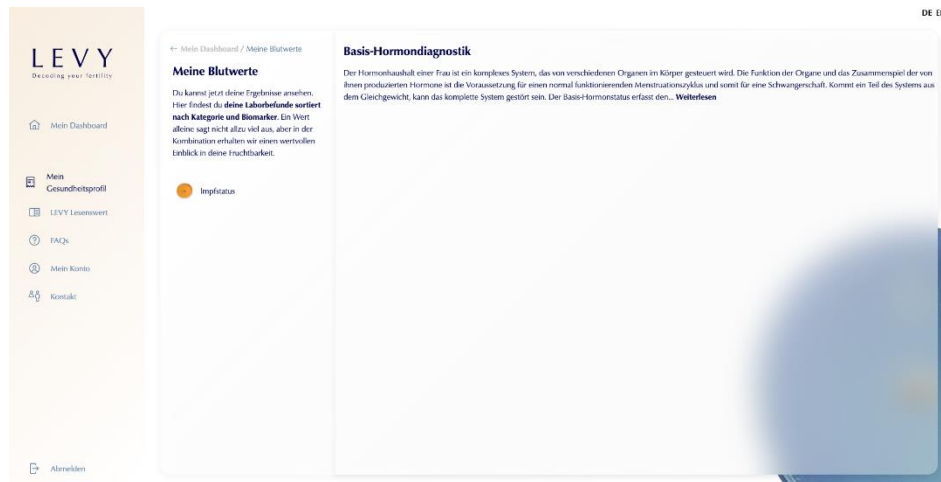

Navigationsleisten



Home: Bringt Sie an die Stelle, an der Sie sich zuletzt in der horizontalen Anzeige ganz oben befunden haben.

Mein Gesundheitsprofil

Wenn alle in der horizontalen Anzeige enthaltenen Schritte abgeschlossen sind, können Sie hier Ihr Gesundheitsprofil einsehen. Sie haben Zugriff auf Folgendes:

- Fragebogen
- Meine Dokumente
- Meine Ergebnisse

Fragebogen

Hier können Sie Ihre Antworten im Fragebogen überprüfen und bei Bedarf Änderungen vornehmen (nur möglich vor dem ersten Gesprächstermin mit dem LEVY Care Team). Änderungen sind nur bis zu Ihrem Gespräch mit dem LEVY Care Team möglich.

Meine Dokumente

Hier können Sie die Dokumente einsehen, die Sie während der Beantwortung des Fragebogens hochgeladen haben. Sollten Sie vergessen haben, ein Dokument hochzuladen, können Sie dies hier nachholen.

Wichtiger Hinweis: Alle Dokumente, die Sie hochladen möchten, müssen mindestens 24 Stunden vor der Konsultation mit einem/r unserer ÄrztInnen hochgeladen werden.

Meine Ergebnisse

Wenn Sie Ihre Laborergebnisse ansehen möchten, können Sie dies über den Menüpunkt Laborergebnisse tun. Dies ist frühestens zum Zeitpunkt der Arztkonsultation möglich.

LEVY Lounge


LEVY Lounge umfasst zusätzliche Dienstleistungen, die die LEVY Health GmbH Ihnen im Anschluss an den LEVY Fertility Code anbietet. Dazu zählen unter anderem Fertilitäts-Coaching, Ernährungsberatung, Vorbereitung auf eine künstliche Befruchtung sowie weitere Arztkonsultationen.

Bitte beachten Sie, dass diese Leistungen nicht Bestandteil des LEVY Fertility Codes sind und daher extra verrechnet werden.

LEVY Lesenswert

Hier haben wir Artikel zusammengestellt, die Ihnen Begriffe, die im LEVY Fertility Code vorkommen, erklären. Sie ist in drei Abschnitte unterteilt:


- Biomarker
- Diagnosen & Erkrankungen
- Therapie

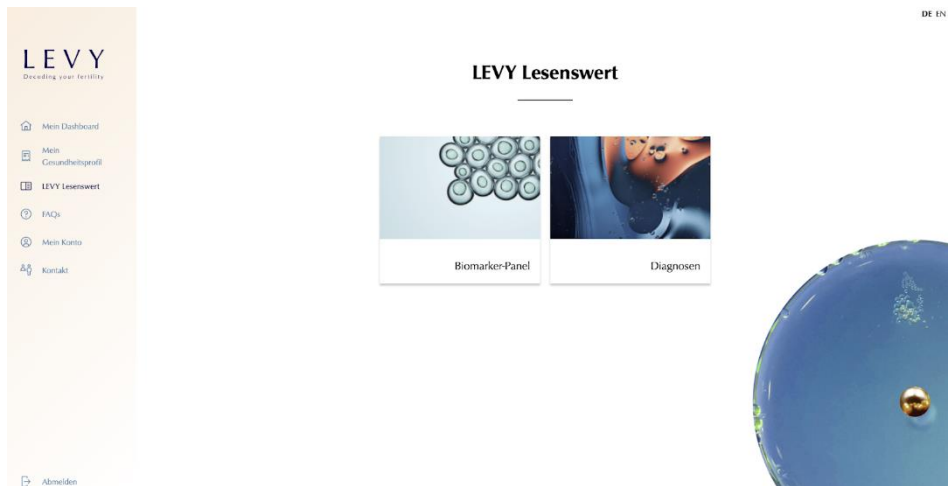

Reklamation und Feedback



Für den Fall, dass Sie eine Beschwerde, Anregungen oder sonstiges Feedback zum LEVY Fertility Code haben, geben Sie uns gerne Bescheid. Unsere Kontaktdetails finden Sie, wenn Sie auf die Schaltfläche "Kontakt" klicken.

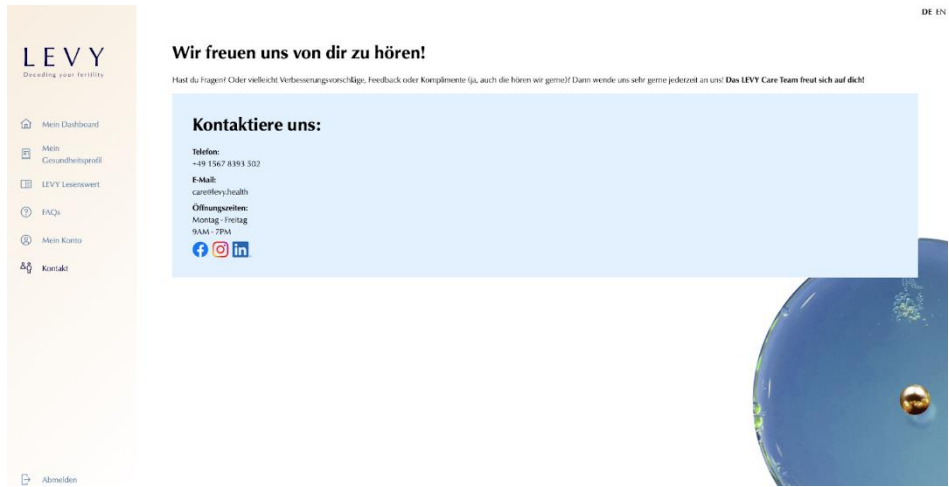

Effective Date: 2023-02-20