









LEVY

HEALTH

Instructions for Use

- [Symbole-Lexikon](#)
- [Levy Health GmbH](#)
- [LEVY Fertility Code Systemanforderungen](#)
- [Rechtliche Hinweise](#)
- [Sicherheit und Einhaltung gesetzlicher Vorschriften](#)
- [LEVY Fertility Code - System-Warnhinweise und Vorsichtsmaßnahmen](#)
- [In-Vitro-Diagnostikum Medizinprodukt](#)
- [Bestimmungsgemäße Verwendung](#)
 - [Kontraindikationen](#)
 - [Nutzer*innenprofil](#)
- [Wie Sie den LEVY Fertility Code verwenden](#)
 - [Schritt 1 - Registrierung](#)
 - [Schritt 2 - Anmeldung](#)
 - [Schritt 3 - Medizinischer Fragebogen](#)
 - [Schritt 4 - Gespräch mit LEVY Care Team](#)
 - [Schritt 5 - Empfehlung für persönliche Labordiagnostik](#)
 - [Schritt 6 - Wählen Sie ein Labor](#)
 - [Schritt 6.1 - Blutabnahme - LEVY Partnerlabor](#)
 - [Schritt 7 - Online Arztkonsultation](#)
 - [Schritt 8 - Deine Ergebnisse](#)
- [Navigationsleisten](#)
 - [Mein Gesundheitsprofil](#)
 - [Fragebogen](#)
 - [Meine Dokumente](#)
 - [Meine Ergebnisse](#)
 - [LEVY Lounge](#)
 - [LEVY Lesenswert](#)
- [Reklamation und Feedback](#)
- [Approval](#)
- [Change History](#)

Symbole-Lexikon

Levy Health GmbH



Für Unterstützung und technische Beratung wenden Sie sich bitte an das LEVY Care Team unter care@levy.health.

E-Mail: care@levy.health

Bitte fügen Sie eine detaillierte Beschreibung aller aufgetretenen Probleme und Ihre Kontaktdaten bei.

LEVY Fertility Code Systemanforderungen



Um den LEVY Fertility Code zu nutzen, müssen Sie 25 bis 51 Jahre alt sein und Deutsch oder Englisch sprechen. Sie benötigen eine persönliche E-Mail-Adresse und ein Gerät mit Internetzugang (Computer, Laptop, Smartphone oder Tablet). Unsere Anwendung ist mit den Versionen der folgenden Webbrowser kompatibel:

Desktop

- Google Chrome (aktuellste Version)
- Microsoft Edge (aktuellste, zweite Version)
- Firefox (neueste Version und Extended Support Release (ESR))
- Safari (aktuellste, zweite Version)

Der LEVY Fertility Code ist nicht für die Verwendung auf einem mobilen Gerät oder Tablet vorgesehen. Der LEVY Fertility Code sollte auf einem Desktop/Notebook verwendet werden.

Rechtliche Hinweise



Kein Teil dieser Publikation darf ohne schriftliche Genehmigung der Levy Health GmbH in irgendeiner Form oder mit irgendwelchen Mitteln, elektronisch oder mechanisch, einschließlich Fotokopie, Aufzeichnung oder einem Informationsspeicher- oder -abrufsystem, vervielfältigt oder übertragen werden.

Die Levy Health GmbH behält sich das Recht vor, ihre Produkte und Dienstleistungen jederzeit zu ändern. Diese Gebrauchsanweisung kann ohne vorherige Ankündigung geändert werden. Obwohl die Gebrauchsanwendung erstellt wurde, um eine genaue Anwendung des LEVY Fertility Codes zu gewährleisten, übernimmt die Levy Health GmbH keine Haftung für Fehler oder für Schäden, die aus dem Gebrauch dieser Information entstehen.

Sicherheit und Einhaltung gesetzlicher Vorschriften

Der LEVY Fertility Code wurde umfassend getestet und erfüllt alle der folgenden anwendbaren gesetzlichen Anforderungen:



Das CE-Zeichen zeigt an, dass der Hersteller sicherstellt, dass das Produkt mit den grundlegenden Anforderungen der europäischen Richtlinie für In-vitro-Diagnostika 98/79/EG übereinstimmt.

LEVY Fertility Code - System-Warnhinweise und Vorsichtsmaßnahmen



- Für den Einsatz in der In-vitro-Diagnostik.
- Vergewissern Sie sich immer, dass das elektronische Gerät, das Sie verwenden, passwortgeschützt ist, um Ihre Daten sicher zu halten, und dass Ihr Passwort nicht in fremde Hände geraten kann.
- Beim Beantworten des Medizinischen Fragebogens ist es wichtig, dass Sie sich in einer Umgebung befinden, die Sie nicht ablenkt. Die Blutdiagnostik die Ihnen im nächsten Schritt empfohlen wird, hängt von den Antworten ab, die Sie geben. Inkorrekte Angaben können somit zu fälschlichen Empfehlungen und damit zu Ergebnissen führen, die auf Sie nicht zutreffen.
- Aufgrund möglicher Software-Fehler im LEVY Fertility Code, kann es dazu kommen, dass Ihnen ein falsches Ergebnis angezeigt wird. Dieses wird im Anschluss von unseren Ärzt*innen geprüft und mit Ihnen besprochen.
- Befolgen Sie ebenfalls alle Anweisungen, wenn Sie sich auf die Blutuntersuchung vorbereiten, da dies die diagnostischen Ergebnisse beeinflussen kann. Da wir keinen Einfluss darauf haben, wie schnell das von Ihnen gewählte Labor Ihre Blutergebnisse auswertet und uns zur Verwendung zurückschickt, kann es dazu kommen, dass Ihnen Ihre

Ergebnisse etwas verspätet mitgeteilt werden. Wir bemühen uns in jedem Fall darum, dass dies nicht geschieht und sind in enger Abstimmung mit den jeweiligen Laboren.

In-Vitro-Diagnostikum Medizinprodukt

Name: LEVY Fertility Code

Bestimmungsgemäße Verwendung



Der LEVY Fertility Code ist eine eigenständige Software zur Unterstützung klinischer Entscheidungen, die In-vitro-Diagnosegeräte und die Krankengeschichte der Patientin nutzt, um Ärzte bei der Diagnose weiblicher Sterilitätskrankheiten zu unterstützen.

Kontraindikationen



Der LEVY Fertility Code darf nicht verwendet werden, wenn Sie innerhalb der letzten drei Monate hormonell verhütet haben oder in den letzten acht Wochen eine Fehlgeburt oder Geburt hatten.

Nutzer*innenprofil

Der LEVY Fertility Code ist für Frauen im Alter von 25 bis 51 Jahren gedacht, die seit mindestens sechs Monaten erfolglos versuchen, schwanger zu werden.

Wie Sie den LEVY Fertility Code verwenden



Schritt 1 - Registrierung

Dies erfordert im ersten Schritt eine Registrierung. Bitte wählen Sie ein Passwort mit ausreichender Stärke (mindestens 8 Zeichen) und stellen Sie sicher, dass niemand auf Ihre Zugangsdaten zugreifen kann.

LEVY
Decoding your fertility

DE EN

1. Wie heißt du? 2. Erstelle deinen Account 3. Bestätige dein Profil...

Hi, ich bin Silvia von LEVY Health.

VORNAME NACHNAME LAND

Dein Vorname Dein Nachname Dein Land


ICH STIMME DEN ALLGEMEINEN GESCHÄFTSBEDINGUNGEN UND DEN DATENSCHUTZRICHTLINIEN DER LEVY HEALTH GMBH ZU

Zurück Weiter

Du hast schon ein Konto? [Melde dich hier an!](#)

Schritt 2 - Anmeldung

Verwenden Sie Ihre E-Mail-Adresse und Ihr Passwort, um sich anzumelden.

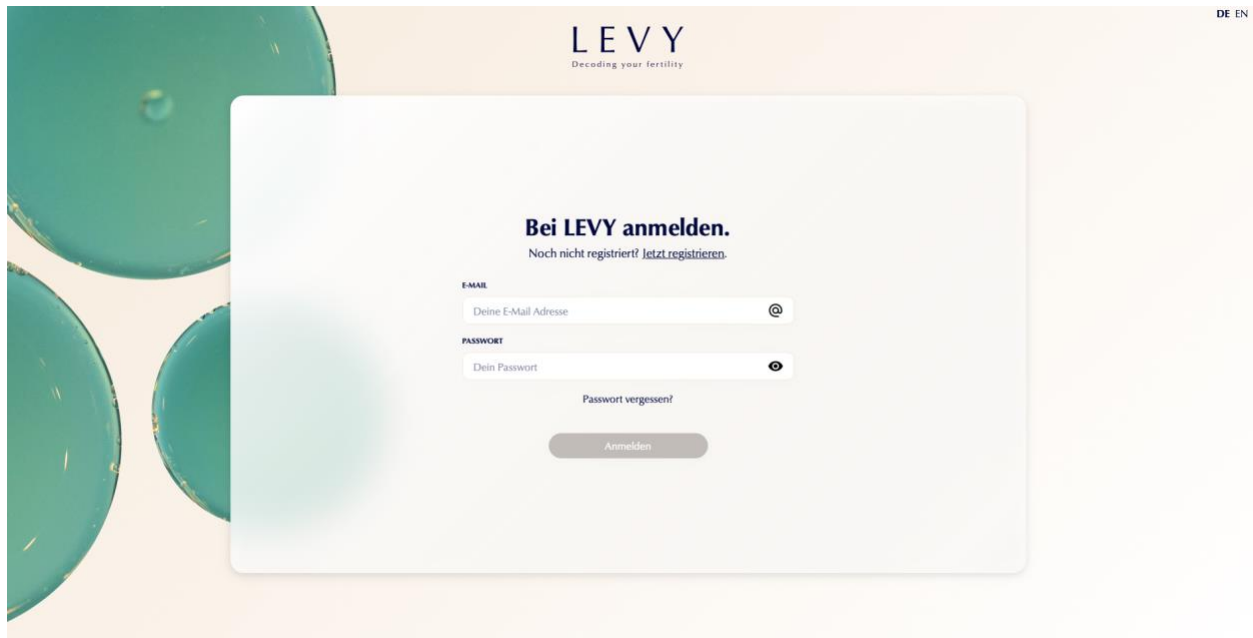

Schritt 3 - Medizinischer Fragebogen

Nach der Anmeldung wird Ihnen der Medizinischer Fragebogen angezeigt, den Sie ausfüllen müssen.

- Um den Fragebogen zu starten, drücken Sie auf starten
- Um die FAQ anzusehen, drücken Sie den "Ansehen"-Button
- Um die Gebrauchsanweisung zu sehen, drücken Sie den "Ansehen"-Button

LEVY
Decoding your fertility

Hallo Pia, hier siehst du, wo du stehst:

Hier Anmelden | Medizinischer Fragebogen | 25%

Medizinischer Fragebogen

Wir starten mit einem wirklich einzigartigen Fragebogen zu deiner Fruchtbarkeit und Gesundheit. Er wurde von **mehreren Kinderwunschärzt*innen entwickelt** und bildet ein einstündiges Anamnese-Gespräch in einer Kinderwunschklinik ab.

Aber keine Sorge, wir erledigen das in etwa **10-15 Minuten**. Unsere Software wählt abhängig von deinen Antworten jene weiteren Fragen aus, die wir brauchen, um dein persönliches Kinderwunsch-Profil zu erstellen. Auf dessen Basis können wir dann eine speziell an dich angepasste Blutuntersuchung empfehlen.

Deine Antworten im Fragebogen werden automatisch gespeichert. Solltest du nicht alle Fragen auf einmal beantworten können, kannst du jederzeit zurückkehren. Wenn du **Laborbefunde, Untersuchungs- oder Behandlungsergebnisse hast**, such sie bitte vorher raus und leg sie neben dich hin, denn wir werden danach fragen.

Bitte sei so ehrlich und genau wie möglich. Unsere Software, der LEVY Fertility Code, ist nur so klug wie deine Antworten. Bei Fragen oder Unklarheiten lies dir bitte unsere FAQs durch oder schick uns eine Nachricht.

[Und los geht's!](#)

FAQs
Schnelle Antworten auf häufig gestellte Fragen findest du in unserer **FAQ-Übersicht**.

[FAQs ansehen](#)

Gebrauchsanweisung
Wie funktioniert der **LEVY Fertility Code** genau? Lies dir unsere **Gebrauchsanweisung** durch!

[Ansehen](#)

[Abmelden](#)

Während der Beantwortung des Fragebogens zur Anamnese werden Sie aufgefordert, alle Ihnen vorliegende Unterlagen hochzuladen, die uns bei der Diagnosestellung helfen können. Ihre Antworten werden automatisch gespeichert.

Schritt 4 - Gespräch mit LEVY Care Team

Sobald Sie den Fragebogen ausgefüllt haben, werden Sie gebeten, einen Termin mit einer/m Vertreter*in des LEVY Care Teams zu vereinbaren. Verfügbare Tage und Uhrzeiten sind blau dargestellt, der von Ihnen gewählte Termin wird Dunkelblau dargestellt.

LEVY
Decoding your fertility

Hallo Pia, hier siehst du, wo du stehst:

Hier Anmelden | Medizinischer Fragebogen | 100%

Buche dein LEVY Care Team CoE

Da dein so geschaffenes Baseline auf deinen Antworten basieren wir dein persönliches Kinderwunsch-Profil erstellt. Es gibt uns Auskunft zu deinen Erbindelegungen, welche die Fruchtbarkeit beeinflusst haben können, jetzt wissen wir, welche Tests du benötigst um herauszufinden, warum du bisher nicht schwanger geworden bist.

Buche jetzt ein Videogespräch mit unserem LEVY Care Team!

[Termin buchen](#)

FAQs
Schnelle Antworten auf häufig gestellte Fragen findest du in unserer **FAQ-Übersicht**.

[FAQs ansehen](#)

Gebrauchsanweisung
Wie funktioniert der **LEVY Fertility Code** genau? Lies dir unsere **Gebrauchsanweisung** durch!

[Ansehen](#)

[Abmelden](#)

Vergessen Sie nicht, sich zum Zeitpunkt des Gesprächs rechtzeitig in den LEVY Fertility Code einzuloggen.

The screenshot shows the LEVY Fertility Code user interface. On the left is a sidebar with the LEVY logo and navigation links: Mein Dashboard, Mein Gesundheitsprofil, LEVY Lesenswert, FAQs, Mein Konto, and Kontakt. The main content area is titled 'Halo Pia, hier siehst du, wo du stehst:' and includes progress indicators for 'Hier Anmelden', 'Medizinischer Fragebogen', and 'Checkin GESPRÄCH'. A central card titled 'Dein Termin mit dem LEVY Care Team' shows a calendar event for 'Donnerstag, 09.06.2022' at '14:00' with a 'Gespräch betreten' button. Below this is a section 'Was erwartest dich bei deinem Check in Call?' with a list of bullet points. To the right are two informational cards: 'FAQs' with a 'FAQs ansehen' button and 'Gebrauchsanweisung' with an 'Ansehen' button. A decorative image of a globe is on the far right.

Schritt 5 - Empfehlung für persönliche Labordiagnostik

Ein/e Vertreter*in des LEVY Care Teams wird Ihnen die Biomarker erklären, die LEVY Fertility Code für Sie empfiehlt. Sie/er wird Ihnen bei der Auswahl eines Labors und des richtigen Zeitpunkts für die Blutentnahme helfen (in der Regel ist dies am Zyklustag 2-5).

Zusätzliche Informationen zu den Biomarkern, die Ihnen zur Untersuchung empfohlen werden, finden Sie, indem Sie auf die Dropdown-Pfeile in den Labor-Panels klicken.

DE EN

LEVY
Decoding your fertility

- Mein Dashboard
- Mein Gesundheitsprofil
- LEVY Lesenswert
- FAQs
- Mein Konto
- Kontakt

Abmelden

Hallo Pia, hier siehst du, wo du stehst:

Hier Anmelden Medizinischer Fragebogen Checkin GESPRÄCH **Deine Blutdiagnostik**

50%

Du möchtest zu deinem Gespräch zurück? [Gespräch betreten](#) Bitte nimm nur über einen Laptop oder PC teil!

Deine Blutdiagnostik

Spitzel Der LEVY Fertility Code hat deine Antworten ausgewertet und dein persönliches Set an Biomarkern zur Laboranalyse erstellt. Unter Biomarkern sind grundsätzlich charakteristische biologische Merkmale deines Körpers zu verstehen; in diesem Fall handelt es sich um Biomarker in deinem Blut, also einzelne Laborwerte.

Wie geht es jetzt weiter? Am besten, du klickst dich durch die verschiedenen Kategorien von Biomarkern, sogenannte Panels, durch. Du erfährst, was genau hinter den einzelnen Laborwerten steckt und warum wir sie für deine Diagnostik brauchen - bei uns gibt es volle Transparenz!

[Basis-Hormondiagnostik](#) [Basis-Vitamindiagnostik](#) [Impfstatus](#)

Basis-Hormondiagnostik €0.00

Der Hormonhaushalt einer Frau ist ein komplexes System, das von verschiedenen Organen im Körper gesteuert wird. Die Funktion der Organe und das Zusammenspiel der von ihnen produzierten Hormone ist die Voraussetzung für einen normal funktionierenden Menstruationszyklus und somit für eine Schwangerschaft. Kommt ein Teil des Systems aus dem Gleichgewicht, kann das komplette System gestört sein. Der Basis-Hormonstatus erfasst den Hormonhaushalt... [Weiterlesen](#)

Deine ausgewählten Biomarker
FSH, LH, AMH, TSH-basal, Prolaktin, Östradiol, Progesteron, Testosteron, DHEA-S, SHBG (Sexualhormon btl. Globulin), Freier Androgenindex (FAI)

[Ins Preis enthalten](#)

Zwischensumme: €87.09 €51.40

[Weiter](#)

[Basis-Vitamindiagnostik](#)

Vitamine gehören zu den sogenannten Mikronährstoffen und sind essenzielle Nährstoffe. Das bedeutet, sie sind für den Körper lebensnotwendig und Sie können nicht vom Körper selbst hergestellt werden (Ausnahme von Vitamin C und Vitamin K). Diese Vitamine sind in der Regel in Nahrungsmitteln enthalten. Wenn Sie sich für eine Blutdiagnostik entscheiden, können Sie sich für eine Blutdiagnostik entscheiden, die alle Vitamine enthält. Wenn Sie sich für eine Blutdiagnostik entscheiden, können Sie sich für eine Blutdiagnostik entscheiden, die alle Vitamine enthält.

Schritt 6 - Wählen Sie ein Labor

Nun müssen Sie ein Labor finden, das Ihnen das Blut abnehmen und auf die Ihnen empfohlenen Laborparameter testen kann. Wir haben mehrere Labore identifiziert, die unsere Anforderungen erfüllen und die Sie auswählen können, um die Diagnostik dort durchführen zu lassen. Ein Mitglied des LEVY Care Teams wird Ihnen während des Gesprächs (siehe Schritt 4) helfen, das nächstgelegene Labor zu finden.

Wenn Sie ein Labor kennen, das noch näher für Sie liegt, können Sie zu diesem Labor gehen, um Ihre Blutprobe entnehmen und analysieren zu lassen. Die Voraussetzungen für das Labor sind:

- Alle im LEVY Fertility Code persönlich für Sie empfohlenen Biomarker können analysiert werden.
- Sie erhalten den Laborbefund in Form eines elektronischen PDFs, wobei alle Ergebnisse mit Zahlen, Einheiten und die dazugehörigen Normbereiche angezeigt werden.

Wichtig: Bei den meisten der von uns empfohlenen Labore ist eine vorherige Terminvereinbarung nicht erforderlich.

DE EN

- Mein Dashboard
- Mein Gesundheitsprofil
- LEVY Lesenswert
- FAQs
- Mein Konto
- Kontakt

Hallo Pia, hier siehst du, wo du stehst:

Hier Anmelden Medizinischer Fragebogen Check-in GESPRÄCH Deine Blutdiagnostik Labor Auswählen

67%

Wähle dein Labor aus

Jetzt ist es an der Zeit, ein Labor aufzusuchen. Warum? Der LEVY Fertility Code ist ein Medizinprodukt, das mit qualitativ hochwertigen, standardisierten Blutbefunden arbeitet. Das kann nur mit Blut gewährleistet werden, das von der Vene im Arm abgenommen und von einem qualifizierten Labor ausgewertet wird. Also ab mit dir ins nächstgelegene Labor!

Nach Namen suchen...

amedes MVZ Hamburg GmbH

📍 Mönckebergstraße 10, 20095 Hamburg ☎ 0800 58 91 688

Montag: 10.00-17.00 Uhr
 Dienstag: 10.00-17.00 Uhr
 Mittwoch: 10.00-14.30 Uhr
 Donnerstag: 10.00-18.00 Uhr
 Freitag: 10.00-14.30 Uhr

Wähle dieses Labor

MVZ amedes für IVF- und Pränatalmedizin in Köln GmbH

📍 Schönhauser Straße 3, 50968 Köln

Montag: 13.00-16.00 Uhr
 Dienstag: 10.00-16.00 Uhr
 Mittwoch: 10.00-12.30 Uhr
 Donnerstag: 10.00-16.00 Uhr

Wähle dieses Labor

Abmelden

Schritt 6.1 - Blutabnahme - LEVY Partnerlabor

Wenn Sie zu einem LEVY Partnerlabor gehen, müssen Sie die Laborüberweisung vorab herunterladen. Drucken Sie das PDF aus, und nehmen Sie es in das Labor mit.

Sobald die Ergebnisse vorliegen, werden Sie per E-Mail informiert, dass Ihre Ergebnisse verfügbar sind.

DE EN

- Mein Dashboard
- Mein Gesundheitsprofil
- LEVY Lesenswert
- FAQs
- Mein Konto
- Kontakt

Hallo Pia, hier siehst du, wo du stehst:

Hier Anmelden Medizinischer Fragebogen Check-in GESPRÄCH Deine Blutdiagnostik Labor Auswählen

67%

Super, vielen Dank! Jetzt nur noch ein paar weitere Informationen...

Jetzt wo du dir dein Labor ausgesucht hast, geht es ans Eingemachte - wir brauchen dein Blut. Für eine Diagnostik, die ganz auf dich persönlich abgestimmt ist, geht es nicht ohne deine roten Blutkörperchen. Jep, das piekt, aber denk daran, du hast es bereits soweit geschafft, das kriegst du auch noch locker hin.

Hier noch ein paar Dinge die du vor dem Laborbesuch beachten solltest:

Wenn du deinen **Zuckerstoffwechsel** untersuchen lässt, dann komm bitte nüchtern ins Labor - Wasser und ungesüßter Tee am Morgen sind ok! Keine körperlich anstrengenden Aktivitäten (Sport, Sex, Stufen steigen, etc.) am Tag der Laboruntersuchung, da dies einige Werte verfälschen kann. Deine Blutabnahme sollte zwischen dem 2. bis 5. Zyklustag stattfinden. Du brauchst keinen Termin vereinbaren, sondern kannst gehen wann es dir passt. Druck den Laborschein aus oder weise vor Ort deinen QR Code am Handy vor. So weiß das Labor, welche Biomarker bestimmt werden müssen und wie viel Blut abgenommen werden muss.

Was passiert nach dem Labor?

Sobald deine Resultate da sind, informieren wir dich via E-Mail. Dann folgt der nächste Schritt: besprich dein Ergebnis und unsere Empfehlungen mit einem/r LEVY Ärzt*in.

📅

📄

📱

📧

Aber eins nach dem anderen...

Wir würden gerne wissen, wann du deinen Besuch im Labor planst. Wir müssen nur das ungefähre Datum wissen, damit wir dir besser helfen können.

TT

MM

Abmelden

Bitte druck den Laborschein aus und nimm ihn ins Labor mit! Ohne Schein, kein Blut. Wir scherzen (leider) nicht - ein Papierdruck ist wirklich nicht der letzte Stand der Technik, aber die Kinderwunschmedizin kann nicht von Heute auf Morgen revolutioniert werden. Wir arbeiten aber daran :)

Laborschein herunterladen

Ausgewähltes Labor

amedes MVZ Hamburg GmbH

📍 Mönckebergstraße 10, 20095 Hamburg
 ☎ 0800 58 91 688

Öffnungszeiten:

Montag: 10.00-17.00 Uhr
 Dienstag: 10.00-17.00 Uhr
 Mittwoch: 10.00-14.30 Uhr
 Donnerstag: 10.00-18.00 Uhr

Schritt 7 - Online Arztkonsultation

Sobald Ihre Laborergebnisse vorliegen, können Sie einen Beratungstermin mit einer/m unserer Ärzt*innen vereinbaren. Klicken Sie auf die Schaltfläche "Termin buchen", um einen Termin zu vereinbaren.

The screenshot shows the LEVY user interface. On the left is a navigation sidebar with the LEVY logo and menu items: Mein Dashboard, Mein Gesundheitsprofil, LEVY Lesenswert, FAQs, Mein Konto, and Kontakt. The main content area is titled "Halo Pia, hier siehst du, wo du stehst:" and includes a progress bar with steps: Hier Anmelden, Medizinischer Fragebogen, Check-in GESPRÄCH, Deine Blutdiagnostik, Zahlung, Labor Auswählen, and Ärztliche Sprechstunde. The current step is "Ärztliche Sprechstunde" with a 88% completion indicator. The main heading is "Vereinbare eine Video-Konsultation mit einer/m LEVY Arzt/Ärztin". Below this, it states "Deine Ergebnisse sind da!" and provides information about the virtual consultation, including a 1:1 duration and the availability of the LEVY Care Team. A prominent orange button labeled "Arzttermin buchen" is centered at the bottom. On the right, there is a teal circular graphic with a "FAQs" box containing the text "Schnelle Antworten auf häufig gestellte Fragen findest du in unserer FAQ-Übersicht." and a button "FAQs ansehen". The top right corner shows "DE EN" language options.

Wenn es an der Zeit ist, dem Anruf beizutreten, wird Ihnen der unten stehende Bildschirm angezeigt. Denken Sie daran, pünktlich zu sein, da sich Ihr Termin sonst verkürzt. Wenn Sie den Termin nicht einhalten können, informieren Sie uns bitte spätestens 24h vorher. Sie können kostenfrei bis zu 24h vor Ihrem Termin eine Buchungsänderung vornehmen. Sofern Sie nicht erscheinen, oder den Termin innerhalb der 24 Stunden Frist ändern, fallen weitere Gebühren an. Diese finden Sie unter LEVY Services, denn ein neuer Termin wird gebucht und verrechnet.

DE EN

LEVY
Decoding your fertility

- Mein Dashboard
- Mein Gesundheitsprofil
- LEVY Lesenswert
- FAQs
- Mein Konto
- Kontakt

Abmelden

Hallo Pia, hier siehst du, wo du stehst:

Hier AnmeldenMedizinischer FragebogenCheck-in GESPRÄCHDeine BlutdiagnostikLabor AuswählenÄrztliche Sprechstunde

83%

Ärztliche Sprechstunde starten

Dein Arzt bzw. deine Ärztin erwartet dich bereits. Du wirst einen detaillierten Einblick in deine Ergebnisse erhalten und deine Anliegen und Fragen besprechen. Es geht nicht nur um das, was wir herausgefunden haben, sondern auch darum dir verschiedene Möglichkeiten und nächste Schritte zu zeigen.

Bitte beachte, dass du erst NACH diesem Termin Zugang zu deinen Ergebnissen und Empfehlungen erhältst. Abgesehen davon kannst du dich jederzeit beim LEVY Care Team melden.

Du kannst deine Arzt Konsultation **5 Minuten** vor Beginn starten.

Startzeit: 14:00, 09.06.2022

Jetzt beitretenBitte nimm nur über einen Laptop oder PC teil!

Meine Blutwerte

Hier findest du deine Laborbefunde, sie sind nach Kategorie und Biomarkern geordnet. Ein Wert alleine sagt nicht allzu viel aus, es ist die Kombination der Werte im Zusammenspiel, die zählt.

Meine Blutwerte ansehen

Meine Empfehlungen

Hier findest du deine Laborbefunde, sie sind nach Kategorie und Biomarkern geordnet. Ein Wert alleine sagt nicht allzu viel aus, es ist die Kombination der Werte im Zusammenspiel, die zählt.

Meine Empfehlungen ansehen

Schritt 8 - Deine Ergebnisse

Sobald Sie Ihr Beratungsgespräch mit unserer/m Arzt/Ärztin hatten, werden Ihnen Ihre Laborergebnisse zur Verfügung gestellt. Diese sind in zwei Abschnitte unterteilt:

- Ihre Ergebnisse:
 - Hier werden Ihre Ergebnisse der Blutuntersuchung angezeigt und ob die Werte innerhalb oder außerhalb des Normbereichs liegen.
- Ihre Empfehlungen:
 - Hier sehen Sie, welche weiteren Schritte Ihr Arzt/Ihre Ärztin mit Hilfe des LEVY Fertility Code für Sie empfiehlt. Die Empfehlungen sind in drei Kategorien unterteilt:
 - Externe Überweisungen
 - Weitere Diagnostik
 - Online Therapie

LEVY
Decoding your fertility

Mein Dashboard

Mein Gesundheitsprofil

LEVY Lesenswert

FAQs

Mein Konto

Kontakt

Abmelden

← Mein Dashboard / Meine Blutwerte

Meine Blutwerte

Du kannst jetzt deine Ergebnisse ansehen. Hier findest du **deine Laborbefunde sortiert nach Kategorie und Biomarker**. Ein Wert alleine sagt nicht allzu viel aus, aber in der Kombination erhalten wir einen wertvollen Einblick in deine Fruchtbarkeit.

Impfstatus

Basis-Hormondiagnostik

Der Hormonhaushalt einer Frau ist ein komplexes System, das von verschiedenen Organen im Körper gesteuert wird. Die Funktion der Organe und das Zusammenspiel der von ihnen produzierten Hormone ist die Voraussetzung für einen normal funktionierenden Menstruationszyklus und somit für eine Schwangerschaft. Kommt ein Teil des Systems aus dem Gleichgewicht, kann das komplette System gestört sein. Der Basis-Hormonstatus erfasst den... **Weiterlesen**

LEVY
Decoding your fertility

Mein Dashboard

Mein Gesundheitsprofil

LEVY Lesenswert

FAQs

Mein Konto

Kontakt

Abmelden

← Mein Dashboard / Meine Empfehlungen

Meine Empfehlungen

Hier findest du deine persönlichen Empfehlungen, basierend auf deinen Antworten im Medizinischen Fragebogen und deinen Laboregebnissen. Wir unterscheiden bei den Empfehlungen zwischen weiterer Diagnostik, Therapie und Überweisungen zu Expert*innen. **Klick dich durch die Karten und finde alles über deinen personalisierten Plan heraus!**

Diagnose

Weitere Diagnostik

Therapie

Überweisung

Weitere Diagnostik

Elleterdurchgängigkeitsprüfung

Chlamydientest

Spermiogramm

Basis-Hormondiagnostik

Lutealphasensuffizienz

Basis-Vitaminsdiagnostik

Spermiogramm

Navigationsleisten



Home: Bringt Sie an die Stelle, an der Sie sich zuletzt in der horizontalen Anzeige ganz oben befunden haben.

Mein Gesundheitsprofil

Wenn alle in der horizontalen Anzeige enthaltenen Schritte abgeschlossen sind, können Sie hier Ihr Gesundheitsprofil einsehen. Sie haben Zugriff auf Folgendes:

- Fragebogen
- Meine Dokumente
- Meine Ergebnisse

Fragebogen

Hier können Sie Ihre Antworten im Fragebogen überprüfen und bei Bedarf Änderungen vornehmen (nur möglich vor dem ersten Gesprächstermin mit dem LEVY Care Team). Änderungen sind nur bis zu Ihrem Gespräch mit dem LEVY Care Team möglich.

Meine Dokumente

Hier können Sie die Dokumente einsehen, die Sie während der Beantwortung des Fragebogens hochgeladen haben. Sollten Sie vergessen haben, ein Dokument hochzuladen, können Sie dies hier nachholen.

Wichtiger Hinweis: Alle Dokumente, die Sie hochladen möchten, müssen mindestens 24 Stunden vor der Konsultation mit einem/r unserer ÄrztInnen hochgeladen werden.

Meine Ergebnisse

Wenn Sie Ihre Laborergebnisse ansehen möchten, können Sie dies über den Menüpunkt Laborergebnisse tun. Dies ist frühestens zum Zeitpunkt der Arztkonsultation möglich.

LEVY Lounge

LEVY Lounge umfasst zusätzliche Dienstleistungen, die die LEVY Health GmbH Ihnen im Anschluss an den LEVY Fertility Code anbietet. Dazu zählen unter anderem Fertilitäts-

Coaching, Ernährungsberatung, Vorbereitung auf eine künstliche Befruchtung sowie weitere
Arztkonsultationen.

Bitte beachten Sie, dass diese Leistungen nicht Bestandteil des LEVY Fertility Codes sind und
daher extra verrechnet werden.


LEVY Lesenswert

Hier haben wir Artikel zusammengestellt, die Ihnen Begriffe , die im LEVY Fertility Code
vorkommen, erklären. Sie ist in drei Abschnitte unterteilt:

- Biomarker
- Diagnosen & Erkrankungen
- Therapie



DE EN

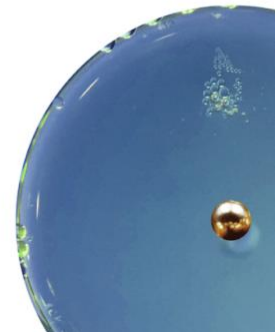

Reklamation und Feedback



Für den Fall, dass Sie eine Beschwerde, Anregungen oder sonstiges Feedback zum LEVY Fertility Code haben, geben Sie uns gerne Bescheid. Unsere Kontaktdetails finden Sie, wenn Sie auf die Schaltfläche "Kontakt" klicken.

DE EN

LEVY
Decoding your fertility

- Mein Dashboard
- Mein Gesundheitsprofil
- LEVY Lesenswert
- FAQs
- Mein Konto
- Kontakt**

Abmelden

Wir freuen uns von dir zu hören!

Hast du Fragen? Oder vielleicht Verbesserungsvorschläge, Feedback oder Komplimente (ja, auch die hören wir gerne)? Dann wende uns sehr gerne jederzeit an uns! **Das LEVY Care Team freut sich auf dich!**

Kontaktiere uns:

Telefon:
+49 1567 8393 502

E-Mail:
care@levy.health

Öffnungszeiten:
Montag - Freitag
9AM - 7PM

